

KARTA PRODUKTU			P739	
Karta opracowana przez:			INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
12.03.2025	Dział Rozwoju Produktu			
Klient / Kraj dostawy				
Nazwa produktu	PODUSZKA Pro Comfort			
Rozmiar	70x80 cm			
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowego wyrobu	wag min - 1080g max - 1130g			
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP70-MFA1-P739			
Kod kreskowy EAN	5905428040766			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	REF: PCF 2			
Oeko-tex certyfikat	IW 00056			
Opis poszewki/Wzór pikowania	poszewka pikowana z wszywką PP70-MFA1-P732-A2 mikrofibra 68gsm SMF17-A1-01 szer 180 cm			
Waga i rodzaj wypełnienia	fala co 5cm 900 g kulka poliester regenerat			
Linia i maszyna	AUTOTIC 2 / P3			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			WSZYSZKA	
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE - AUTOMAT				
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	Rękaw z nadrukiem			
Zamknięcie worka	Zgrzewana automatycznie			
Dodatkowe komponenty	Ulotka medyczna na automat			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				
Opakowanie zbiorcze	karton zbiorczy 80x60x50cm	etykieta Z KODEM NA KARTON 35905428040767		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	12		
	ilość kartonów na paletcie	8		
	CHEP			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
Wszywka z wydrukowanym LOT TT/RR - wszyta na AT2. Poduszka rolowana do rękawa - automat. Etykiety zbiorcze wg projektu.				

wszywka pielęgnacyjna

LOT: 48/11.2024
MIJCE/PCF/Rev.0/11.2024

JOHN COTTON
EUROPE

PODUSZKA PROCOMFORT
70 x 80 cm

WYRÓB MEDYCZNY

POSZYCIE: 100% poliester
WYPEŁNIENIE: 100% poliester

Oeko TEX
STANDARD 100
www.oeko-tex.com

WYPRODUKOWANO W POLSCE

MIJCE/PCF/Rev.0/11.2024

LOT 48/11.2024

REF PCF 2

5-905428 040766 >

www.johncotton.eu

John Cotton Europe Sp. z o.o.
ul. John Cotton Europe 1
58-310 Szczawno-Zdrój, Polska
tel.: +48 74 84 56 446
e-mail: contact@johncotton.eu

PRODUCENT:

PODUSZKA PROCOMFORT

WYRÓB MEDYCZNY

Basic

WYRÓB MEDYCZNY

ProComfort

Poduszka 70x80cm

POSZYCIE: 100% poliester
WYPEŁNIENIE: 100% poliester

Dobra Cena!

www.johncotton.eu

REF PCF 2
KCF 2 (Rev.0/11.2024) PL

5-905428 040766

PRODUCENT:
"John Cotton Europe" Sp. z o.o.
ul. John Cotton Europe 1
58-310 Szczawno-Zdrój, Polska

WYPRODUKOWANO W POLSCE

CAŁOCROZNA
ODPOWIEDNIA DLA OSÓB Z ALERGIĄ
PUŚYSTA
ŁATWE PRANIE W 60°C

ułatka medyczna

PL Instrukcja użytkownika

Przed przygotowaniem do używania wyrobu należy uważnie zapoznać się z instrukcją użytkownika. Instrukcja przeznaczona jest w celu poinformowania o prawidłowym użytkowaniu wyrobu. Wyrobó należy stosować zgodnie ze wszystkimi informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zastosowania wyrobu oraz w każdym przypadku podejrzenia choroby alergicznej należy skonsultować się z lekarzem.

PODUSZKA PROCOMFORT REF PCF 1 | PCF 2

Wyrób medyczny

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

Podstawą leczenia chorób alergicznych jest unikanie alergenów, czyli czynników wywołujących uczulenie. Udoświadczono, że na podłożu podłaskim gęstym alergenowi, czyli roztocze kurzu domowego, nie namnaża się – dlatego poduszka o takim układzie stanowi materiał barierowy przed tym alergenem. Poduszka przeznaczona jest do stosowania wspaniałego – w zapewnieniu i łagodzeniu przynajmniej częściowo alergii. Jako jeden z elementów wielokierunkowego działania zmierzającego do ograniczenia ekspozycji na alergeny, alergiczny przewlekły nosicieli, osoba cierpiąca, alergicznego zapalenia skóry, innych chorób o podłożu alergicznym (np. zapalenie spojówek, zatoki, krtani, gardła (regulacji, podniebienia).

W każdym przypadku podejrzenia choroby alergicznej należy zasięgnąć porady lekarza. Nie stosować wyrobu jako jedynego środka zmierzającego do łagodzenia lub zmniejszenia objawów choroby alergicznej.

Wskazując Międzynarodową Statystyczną Klasyfikację Chorób i Problemów Zdrowotnych, ICD-10, odpowiednio: J30, J45, L01, L10, L20, L27, L30, L35.

SPOSÓB UŻYTKOWANIA

Poduszka stosować pod głowę lub w odrobinie kątowym łóżku, podłasko odpoczywać lub snu, u osób cierpiących na alergię (alergików) i osób zdrowych. W celu zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych, wyrób używać zawsze pościelony w pościeli białej. Należy codziennie zmieniać poduszkę, aby zapobiec dyfuzji w jej wypełnieniu. Poduszka jest przeznaczona do użytku w warunkach domowych, do wieloletniego użytku, o ograniczonej elastyczności maksymalny czas domowego użytku od 10 do 12 godzin. W przypadku dłuższego użytku należy obowiązkowo przewietrzyć wyrób. Wyrobó stosować zgodnie z przewidzianym zastosowaniem oraz z innymi informacjami znajdującymi się w niniejszej instrukcji i na etykietach wyrobu.

PRZECIWKAZANIA DO STOSOWANIA

Nie stosować w przypadku osób, u których stwierdzono uczulenie na poliester. Nie stosować w bezpośrednim kontakcie ze skórą. Nie stosować w czasie ciąży i 3 roku życia. Nie stosować w razie wystąpienia zmian skórnych, innych objawów alergicznych, a także u osób mających uszkodzoną skórę, otwarte niezabezpieczone opatrunkiem rany (lub owrzodzenia).

OSTRZEŻENIA

Wyrób jest wyrobem wielokrotnego, osobistego użytku. Ze względów zdrowotnych i higienicznych, wyrób nie może być jednorazowo lub ponownie używany przez inną osobę. W przypadku konieczności ponownego użycia przez inną osobę, przed użyciem należy obowiązkowo przeprowadzić proces prania wyrobu i stosowanej pościeli.

Wyrób stosować zawsze pościelony w dodatkowej pościeli.

Nie przechowywać oraz nie używać wyrobu z zawieszonym (lub przemieszczonym) w węgłach, zakurzonej pościeli.

Przedstawienie użytkownika do użytku w przypadku wystąpienia pierwszych oznak uczulenia, aby uniknąć dostania się do wnętrza wypełnienia wyrobu. Może to stanowić zagrożenie zadławienia lub uszkodzenia się małego dziecka, w przypadku zażegnania małego elementu materiału wypełniającego lub w przypadku zażegnania innych oddzielnych części lub materiałów. Nie stosować wyrobu w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zabrudzenia (znacznego zanieczyszczenia). W razie uszkodzenia lub w przypadku znaczących nieczystości do usunięcia zabrudzeń, należy wymienić wyrób na nowy. Pod wpływem skutku używania lub przeprowadzanych procesów prania możliwe jest zmniejszenie lub zmiana barwy pościeli (zdręgnięcie), a także istnieje możliwość zrywania się wypełnienia wyrobu.

Wyrób trzymać z dala od źródeł ciepła, grzejników, kaloryferów, ciepłego ognia i innych źródeł ciepła.

Oczyszczanie i konserwacja wyrobu wynosi 2 lata, bez utraty pieniężnych właściwości, przy zachowaniu stosowania wyrobu zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji i na etykietach wyrobu.

Opakowanie foliowe może być niebezpieczne dla dzieci. Po rozpakowaniu wyrobu należy uważnie opakowanie, aby nie poruszać w ciągu czasu.

W przypadku pogorszenia się reakcji uczuleniowych lub jakiegokolwiek innych działań niepożądanych związanych z użytkowaniem wyrobu, należy natychmiast zaprzestać używania i skonsultować się z lekarzem.

SPOSÓB PRZECHOWYWANIA I KONSERWACJI

Wyrób przechowywać w oryginalnym opakowaniu. W trakcie transportu i przechowywania, należy zabezpieczyć wyrób przed zabrudzeniem, uszkodzeniem, zanieczyszczeniem oraz uszkodzeniem mechanicznym. Wyrób przechowywać w temperaturze od 15°C do 30°C, w suchym, przewiewnym, pozbawionym wilgoci i nadmiernej kurzu pomieszczeniu. Nie namoż wyrób na działanie niskich temperatur i wilgoci. Wyrób zabezpieczyć przed nadmiernej ekspozycji na kurz i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Proces konserwacji wyrobu przeprowadzić, co najmniej 2-3 razy w roku. Nie przechowywać wyrobu zabrudzonego lub zanieczyszczonego. Nie prać z wyrobami innego typu. Po przeprowadzonym procesie prania należy mocno stłoczyć poduszkę, należy stosować następujące parametry konserwacji wyrobu:

UWAGA: Wyrób należy poddawać okresowej procedurze prania w wysokiej temperaturze, okresowemu działaniu niskich temperatur (zamrażarki), a także zalecane jest stosowanie środków rozczyszczających, w celu eliminacji alergenów.

SKŁAD

Prócz 100% poliestru.

Wypełnienie: 100% poliestru.

WYJAŚNIENIE SYMBOLI STOSOWANYCH NA ETYKIETACH WYROBU

CE Oznakowanie CE (polsterowanie zgodności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745)

MD Wyrób medyczny

REF Numer katalogowy

LOT Numer serii

Trzymać z dala od światła słonecznego

Chroń przed wilgocią

Dopuszczalna temperatura

WYJAŚNIENIE SYMBOLI OZNACZAJĄCYCH PROCES KONSERWACJI WYROBU

60 Maksymalna temperatura prania 60°C, proces normalny

Nie stosować: bielienia

Nie czyścić: chemicznie

Dopuszczalne suszenie w suszarni bębnowej, temperatura niska, temperatura wyjściowa maks. 60°C

Nie prasować

W razie wystąpienia jakiegokolwiek incydentu związanego z wyrobem, należy niezwłocznie poinformować producenta o tym zdarzeniu pisemnie na adres: "John Cotton Europe" Sp. z o.o., ul. John Cotton Europe 1, 58-310 Szczawno-Zdrój, Polska, telefonownie pod numerem telefonu: +48 74 84 56 446 lub elektronicznie na adres e-mail: orders@johncotton.eu oraz właściwy organ państwa członkowskiego, na którego terytorium miał miejsce incydent.

"John Cotton Europe" Sp. z o.o.
ul. John Cotton Europe 1
58-310 Szczawno-Zdrój, Polska
tel.: +48 74 84 56 446 | orders@johncotton.eu
www.johncotton.eu

CE 22 PAP

MIJCE/PCF/Rev.0/11.2024 PL

etykieta zbiorcza na karton

John Cotton Europe Sp. z o.o.
58-310 Szczawno-Zdrój, ul. John Cotton Europe 1
www.johncotton.eu

PODUSZKA Pro Comfort 70x80

REF KCF 2

Ilość sztuk: 12

35905428040767

LOT 11/03.25

CE

WPP70-MFA1-p739

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			P739
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM /date/ OPRACOWANE przez /PREPARED by /signature/ E.Sajko ZATWIERDZONE przez / APPROVED by /signature/			
			PODUSZKA Pro Comfort
			70x80 cm
			WPP70-MFA1-P739
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,82mb tkanina SMF17-A1-01 szer 180 cm :3
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,82mb flizelina 15/17 gm2 szer 200cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	flis 100g/m²
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	150g - zużycie flisa / poszewka
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P- 3 1022
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1200szt
	Waga w kg	Weight in kg	900g
	+ % Odpadu	Scrap %	
OWATA KUPOWANA CARDING	Linia nr	Line number	
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	
	+% Odpadu	Scrap %	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	AUTOTIC2 fala co 5cm 1200mb
	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1440szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	nici ND -65mb NG -60mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	zaszywanie boki - 23mb
SZYCIE I WYKONCZENIE	Linia nr	Current Speed per 1 shift	P 3 - 1022 - AUTOMAT
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	0,75mb / zaszycie
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	800szt stępnówka
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ROLOWANIE	Rolowanie	Current Speed per 1 person / shift	
PAKOWANIE PACKAGING	Składanie kartoników	Current Speed per 1 person / shift	700szt, pakowana do torby z etykietą
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1200szt karton zbiorczy
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej poduszki
			waga poszewki - 230g (220g - 230g) waga poszewki z flisem
			900g
			wag min - 1080g max - 1130g